


外反母趾の足をサポートする サポーターのご紹介



外反母趾とは


足部の筋力が低下し、アーチが崩れて開張足になると、外反母趾になりやすいといわれています。足の幅が少しずつ広がり、母趾や第5趾(小指)が靴などに当たり徐々に足の変形につながるとされています。さらに進行すると、母趾の付け根がくの字に曲がったり、母趾と第2趾(人差し指)が重なったりして変形が進行し痛みを伴います。

正常な横アーチ

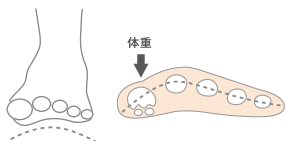


開張足のとき

母趾内旋 アーチが崩れて幅が広がり、母趾内転横頭引っ張られる

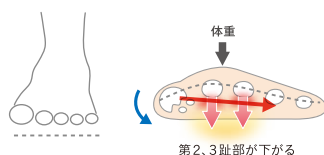


こんなことはありませんか？ 医師に相談してください。
外反母趾かもしれません。

足裏の第2趾(人差し指)の付け根あたりが痛い

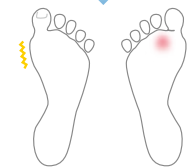

(足の裏)

母趾が曲がってきた、母趾の付け根が突出して痛い

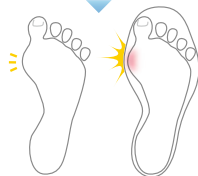

母趾と第2趾(人差し指)が重なったり、裸足で歩いているときでも曲げるだけで痛い



横アーチとは



足には、母趾側と第5趾(小指)側にある2つの縦アーチと、母趾のつけ根から第5趾(小指)のつけ根までを結ぶ**横アーチ**の3つの立体的なアーチがあります。アーチ構造は歩行時の衝撃を吸収するばねとして働く他に、体重移動を円滑にする役割を果たしています。

外反母趾の足をサポートするサポーターのご紹介

サポーター本体による中足骨部の圧迫と、足底部に配置したパッドによる中足骨部の押し上げにより、横アーチの形成、保持によって外反母趾の足をサポートします。

横アーチを形成・保持し、外反母趾の足をサポート



サポーター本体による
中足骨部の圧迫

+



足底部のパッドで中足骨部を押し上げる



サポーター本体で 中足骨部を圧迫


足を通してストラップをとめるだけで簡単に装着できます。サポーター本体で中足骨部を圧迫して持ち上げ、横アーチを形成します。また、伸縮性のある両側のストラップで圧迫力の調節ができます。



足底部のパッドで 中足骨部を押し上げる

足底部に中足骨部を押し上げて横アーチを形成し保持するパッドを配置しました。

パッドは必要に応じて取り外しができるため、母趾球の位置に合わせて調節したり、取り外して使用したりすることもできます。

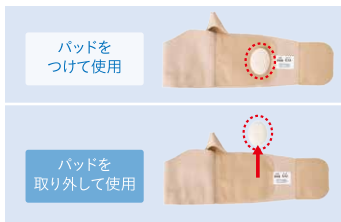

かさばりにくく 肌触りの良い薄い素材

サポーター本体には肌触りの良い薄い素材を使用しています。かさばりにくい素材のため、靴を履いても日常生活の妨げになりにくい仕様です。



ファシリエイドサポーター：外反母趾

FACILIAID SUPPORTER

〈サイズ表〉

品番	サイズ	適用範囲(足囲)	1箱入数
303601	右 S	21cm~23cm	1コ
303602	右 M	23cm~25cm	
303603	右 L	25cm~27cm	
303611	左 S	21cm~23cm	1コ
303612	左 M	23cm~25cm	
303613	左 L	25cm~27cm	

サイズの選び方

足囲に合わせて選んでください。

足囲は母趾と第5趾のつけ根の周囲を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。



製品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。

ファシリエイドサポーター 外反母趾 装着説明動画

装着方法は動画でもご確認いただけます。



製品に関する詳細およびご利用については
当院までお問い合わせください。

発行

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

P34000 2018.05